



Destiny mini

GUIDE D'UTILISATION

MINI-CONTOUR D'OREILLE



Destiny™

SOMMAIRE

| | |
|---|----|
| Votre mini-contour d'oreille | 1 |
| Identification | |
| Caractéristiques et Identification | 2 |
| Préparation | |
| La pile | 4 |
| Indicateur de fin de vie de pile | 6 |
| Verrouillage du tiroir pile | 7 |
| Insertion et Extraction | 10 |
| Fonctionnement | |
| Marche/Arrêt et Contrôle du volume | 15 |
| Multiprogramme | 16 |
| Microphones directionnels | 17 |
| Utilisation du téléphone | 18 |
| Self Check | 20 |
| Rappel de rendez-vous | 21 |
| Indicateurs sonores | 22 |
| Entretien et prévention | |
| Entretien journalier | 24 |
| Service Après-vente | 30 |
| Problèmes et Solutions | 31 |
| Conseils pour une meilleure communication | 32 |
| Rappel | 34 |
| Partenariat | 35 |
| Garantie | 36 |
| Notes | 37 |

Félicitations pour avoir choisi le mini-contour d'oreille.

Votre mini-contour d'oreille utilise le meilleur de la technologie numérique pour optimiser votre compréhension et votre confort d'écoute. Il se compose d'une coque contenant un microprocesseur à traitement de signal numérique, reliée par un coude puis à un embout sur-mesure qui s'adapte confortablement dans votre oreille.

Pour un maximum d'efficacité, vous devez adopter une attitude positive tout au long du processus d'adaptation pour améliorer votre audition. L'amélioration résultera de la combinaison de vos désirs, de votre apprentissage et de votre patience. Tout ceci représente un avantage significatif pour votre retour dans le monde sonore.

Nous sommes persuadés que votre plaisir d'entendre s'améliorera grâce aux performances de votre appareillage auditif et à l'attention toute particulière que nous lui avons donnée.



Lisez ce guide attentivement pour profiter au mieux de toutes les fonctions avancées de cette nouvelle aide auditive. Pour tous renseignements complémentaires, contactez votre audioprothésiste.

CARACTERISTIQUES ET IDENTIFICATION

1. Coude
2. Microphones directionnels
3. Bouton-poussoir Multiprogramme
4. Tiroir pile (Marche/Arrêt)
5. Indicateur de côté (**Rouge** : oreille droite)
(**Bleu** : oreille gauche)
6. Identification par un numéro de série
7. Identification par les noms du fabricant et du modèle
8. Appareillage avec embout sur-mesure
9. Appareillage ouvert avec embout standard
10. Appareillage ouvert avec embout sur-mesure

Votre mini-contour d'oreille est configuré en appareillage ouvert (OPEN) :


- avec un embout standard
- avec un embout sur-mesure

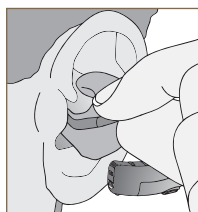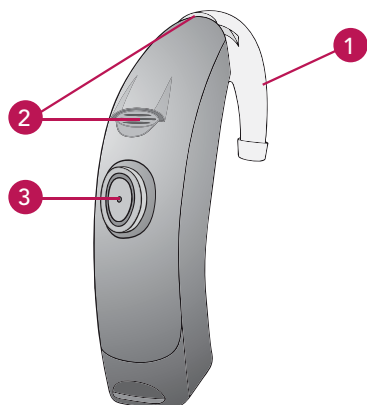


8



9

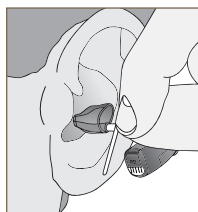

10

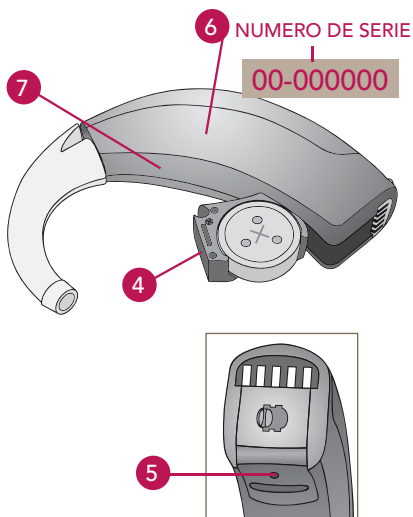


LA PILE

Votre mini contour d'oreille utilise une pile de type Zinc Air et modèle 312. Cette taille est identifiée pas un code de couleur marron sur l'emballage des piles. Assurez-vous que le type et le modèle soient corrects.




INSERTION ET EXTRACTION DE LA PILE


1. Glissez l'ongle sous le rebord du tiroir pile.
2. Ouvrez le tiroir pile et tirez doucement vers le bas. Retirez la pile usagée.
3. Retirez l'étiquette adhésive de la pile neuve.
4. Placez le côté "+" de la pile du même côté que celui gravé dans le rebord du tiroir pile.
5. Fermez doucement et complètement le tiroir pile.

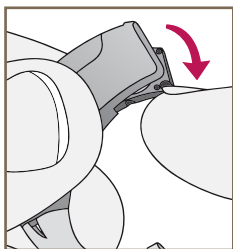


1

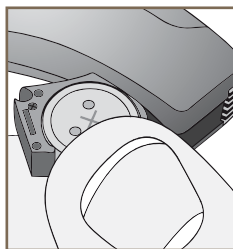


2

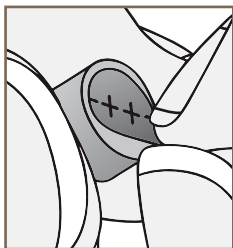

3

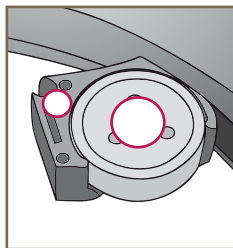

4

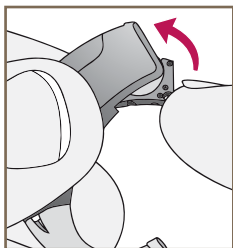

5


INDICATEUR DE FIN DE VIE DE PILE

Un indicateur sonore sera émis quand le voltage de la pile faiblira. Vous aurez environ 20 minutes* pour la remplacer, faites-le dès que vous entendez ce signal. Quand la pile sera trop faible pour faire fonctionner l'aide auditive, vous entendrez un bip pendant 2 secondes et l'appareil s'arrêtera.


** Le temps disponible entre la pile faible et la fin de vie de la pile dépendra du niveau sonore ambiant.*

VERROUILLAGE DU TIROIR PILE

Pour verrouiller le tiroir pile, utilisez un outil approprié pour faire coulisser la targette vers la gauche.

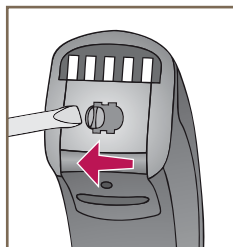

Pour le déverrouiller, avec l'outil, faites coulisser la targette dans le sens opposé (vers la droite).

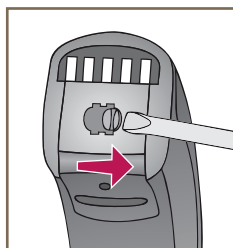





Le blocage du tiroir pile n'est pas nécessaire pour le fonctionnement de l'appareil.

Prévention

- **NE JAMAIS FORCER LA FERMETURE DU TIROIR PILE.** Si le tiroir pile ne ferme pas complètement, vérifiez si la pile est insérée dans le bon sens du tiroir pile.
- **NE PAS OUVRIR LE TIROIR PILE TROP FORT, CELA RISQUERAIT DE L'ENDOMMAGER.**
- Il est conseillé de changer la pile au-dessus d'une table ou d'un bureau afin de supprimer les risques de chutes, à cause de sa petite taille.
- Apportez les piles usagées dans les lieux spécialement destinés aux traitements des déchets spéciaux.
- Consultez votre audioprothésiste en cas de problème avec la pile. Il saura vérifier les type et modèle de pile que vous utilisez et qui peuvent fournir des performances différentes.

ATTENTION

Avaler une pile peut entraîner des dommages sur votre santé.


-  Assurez-vous que les piles ne soient pas à la portée des enfants, des handicapés mentaux ou des animaux domestiques.
-  Afin de ne pas risquer de confondre les piles avec vos médicaments, rangez-les dans un endroit différent.
-  Ne jamais mettre de pile dans la bouche afin de ne pas risquer de l'avaler. Ne jamais lécher une pile car cela peut provoquer de sérieuses brûlures et une intoxication.
-  **Consultez immédiatement un médecin en cas de brûlures causées par le léchage d'une pile et en cas de pile avalée.**

INSERTION ET EXTRACTION


1. Tenez l'embout entre le pouce et l'index du côté externe près du tube reliant l'embout auriculaire au mini-contour.
2. Insérez doucement le conduit de l'embout dans votre conduit auditif.
3. Ajustez son positionnement.
4. Poussez l'embout à sa place avec le bout du doigt.
5. Placez doucement le mini-contour derrière le pavillon en faisant attention de ne pas tordre le tube.

Pour l'extraire, attrapez l'embout dans le conduit auditif et tirez-le doucement hors de l'oreille. Vous pouvez faciliter l'extraction de l'embout en tirant le lobe de l'oreille vers le bas entre le pouce et l'index. **NE TIREZ PAS SUR LE TUBE.** Puis retirez l'aide auditive.

Embout sur-mesure

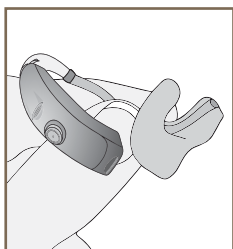


1

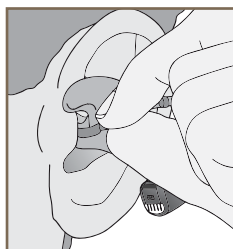


2




3

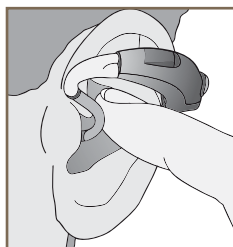

4

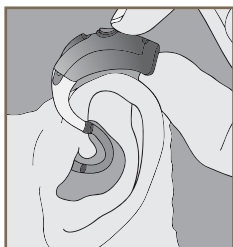


5

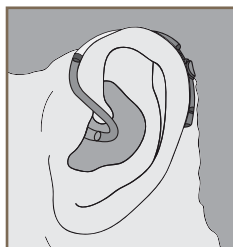


INSERTION ET EXTRACTION

1. Tenez la poignée de maintien entre le pouce et l'index, du côté externe près du tube reliant l'embout au mini-contour. Insérez doucement le conduit de l'embout dans votre conduit auditif. Puis poussez l'embout à sa place avec le bout du doigt.
2. Placez doucement le mini-contour derrière le pavillon en faisant attention de ne pas tordre le tube.
3. Avec le bout du doigt, placez l'ergot de rétention dans le fond de votre pavillon. Auparavant, afin de faciliter la mise en place, vous pouvez assouplir et arrondir l'ergot de rétention en le maintenant entre le pouce et l'index.
4. Assurez-vous que l'ergot soit correctement placé dans le fond du pavillon en le poussant du bout du doigt.
5. Pour extraire l'embout, retirez tout d'abord l'ergot puis attrapez la poignée de maintien. Tirez-le délicatement jusqu'à extraction complète. Puis retirez l'aide auditive.


Appareillage ouvert avec embout standard ou sur- mesure

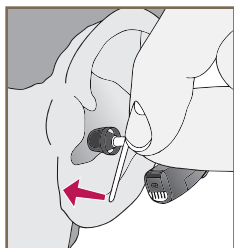


1

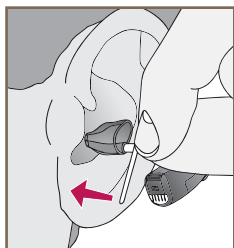

1

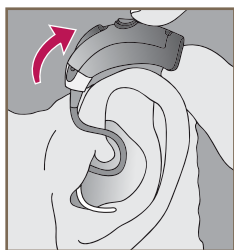

2

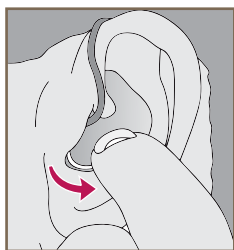

3

Prévention

- Une légère irritation ou échauffement peut survenir dans le conduit auditif externe. Cela peut être causé par la pression de l'embout sur les parois et sera facilement rectifié par votre audioprothésiste. Consultez votre audioprothésiste.
- Consultez votre audioprothésiste, en cas de manifestation allergique, celui-ci a le choix entre différents matériaux.
- Consultez rapidement un médecin, en cas de réaction sévère, d'écoulement, de sécrétion de cérumen excessive ou toute autre manifestation anormale.

MARCHE/ARRET

Mise en marche : insérez une pile dans le tiroir pile et fermez-le complètement

Arrêt : ouvrez le tiroir pile complètement pour éviter tout contact entre la pile et les contacts pile.

Votre aide auditive est programmée avec un délai de mise en marche. Ceci vous permet de disposer de quelques secondes pour mettre votre aide auditive en place avant qu'elle soit mise sous tension. Votre audioprothésiste cochera le délai dont vous disposez.

Votre aide auditive est équipée d'un délai de mise en marche de :


1 seconde 7 secondes 15 secondes

CONTROLE DU VOLUME

Votre aide auditive a été réglée par votre audioprothésiste pour vous fournir une correction personnalisée. Si les sons vous paraissent généralement trop forts ou trop faibles, contactez votre audioprothésiste.

MULTIPROGRAMME

Votre mini-contour d'oreille s'ajuste automatiquement. Vous disposez d'un bouton-poussoir qui vous permet de sélectionner des réglages correspondant à la situation d'écoute dans laquelle vous êtes. La mise en marche du mini-contour d'oreille fournit le programme de réglages normaux. Les programmes supplémentaires sont accessibles en pressant le bouton-poussoir sur la face externe du mini-contour d'oreille.

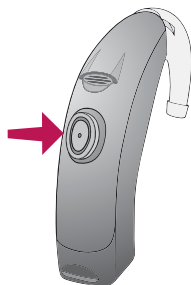

Des indicateurs sonores (ou bips) permettent d'identifier sur quel programme le mini-contour d'oreille est utilisé. Par exemple, celui-ci émettra 2 bips lors de son passage sur le programme n°2. Dans le tableau ci-dessous, vous trouverez tous les renseignements concernant les programmes disponibles.

| PROGRAMME | SITUATION D'ECOUTE | SIGNAL SONORE |
|-----------|--------------------|---------------|
| 1 | | |
| 2 | | |
| 3 | | |
| 4 | | |

MICROPHONES DIRECTIONNELS

Si votre aide auditive est équipée de microphones directionnels, votre audioprothésiste cochera la case appropriée.

- Votre aide auditive est équipée de microphones directionnels.

Les microphones directionnels vont vous aider à améliorer votre compréhension dans des environnements bruyants tels que les restaurants, les cocktails et autres situations très bruyantes.

Lorsque les microphones directionnels sont activés automatiquement ou par le bouton-poussoir, les sons provenant de devant vous seront augmentés tandis que ceux provenant des autres directions seront réduits. Pour bénéficier au maximum de l'effet directionnel, il est important que la personne avec qui vous conversez se tienne face à vous.

| Programme | Activation | | |
|-----------|-------------|--------|-----|
| 1 | Automatique | Manuel | OFF |
| 2 | Automatique | Manuel | OFF |
| 3 | Automatique | Manuel | OFF |
| 4 | Automatique | Manuel | OFF |


UTILISATION DU TELEPHONE

Votre aide auditive comprend des dispositifs pour vous aider à utiliser le téléphone.

REPONSE TELEPHONE AUTOMATIQUE

Placez le combiné téléphonique sur votre oreille comme pour une utilisation normale. Dès que celui-ci est correctement positionné, les fonctions téléphoniques s'activeront automatiquement. Un signal sonore va vous signaler quand votre aide auditive va passer en mode téléphone. Une fois le combiné éloigné, votre aide auditive reviendra automatiquement au programme d'écoute normale.

La façon de placer l'écouteur du combiné téléphonique est différente. Il suffit de tenir le combiné près de l'oreille mais sans l'appuyer car cela pourrait générer un sifflement. Il faut trouver le meilleur angle de position pour avoir la meilleure écoute.

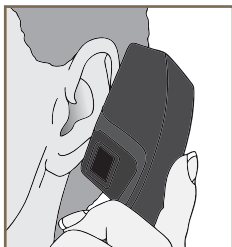

Nous vous conseillons de vous exercer tout d'abord avec quelqu'un que vous connaissez afin de trouver la position pour obtenir la meilleure écoute.



TELEPHONES COMPATIBLES AVEC L'AIDE AUDITIVE

La performance de votre aide auditive peut varier selon les téléphones. Par conséquent, nous vous conseillons d'essayer votre téléphone avec votre aide auditive ou si vous décidez d'en acheter un nouveau, assurez-vous avant, qu'il fonctionne avec votre aide auditive.

Pour plus d'informations, référez-vous au chapitre «Téléphone compatible avec une aide auditive» dans le guide d'utilisation de votre téléphone ou auprès de votre audioprothésiste.

SELF CHECK

Certaines aides auditives sont capables d'auto-diagnostiquer l'état de leurs composants. Cette fonction est appelée Self Check. Si votre aide auditive est équipée de cette fonction, votre audioprothésiste cochera la case appropriée.

Votre fonction Self Check est activée.

L'indicateur est :

Signal vocal "Bon" ou "Prendre rendez-vous"

Signal sonore

Pour lancer le Self Check :

1. Ouvrez et fermez le tiroir pile trois fois.
2. Mettez votre aide auditive.
3. Ecoutez le signal.
4. Prenez rendez-vous avec votre audioprothésiste si le signal vous l'indique.

RAPPEL DE RENDEZ-VOUS

Certaines aides auditives sont programmées avec un "Rappel de rendez-vous" indiquant que le moment est venu de prendre rendez-vous. Si votre aide auditive est équipée de cette fonction, votre audioprothésiste cochera la case appropriée.

- Votre fonction Rappel de rendez-vous est activée. L'indicateur est :
- Signal vocal "Prendre rendez-vous"
- Signal sonore

Le Rappel de rendez-vous sera émis automatiquement lorsque vous entendez le signal correspondant. Prenez rendez-vous avec votre audioprothésiste.

INDICATEURS SONORES

Activé

Programme 1

- Oui
 Non

Programme 2

- Oui
 Non

Programme 3

- Oui
 Non

Programme 4

- Oui
 Non

Pile faible

- Oui
 Non

Fin de vie de pile

- Oui
 Non

Self Check

- Oui
 Non

Rappel de rendez-vous

- Oui
 Non

| Activation | Type d'indicateur |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Off <input type="checkbox"/> Automatique <input type="checkbox"/> Manuel | <input type="checkbox"/> Vocal <input type="checkbox"/> 1 bip |
| <input type="checkbox"/> Off <input type="checkbox"/> Automatique <input type="checkbox"/> Manuel | <input type="checkbox"/> Vocal <input type="checkbox"/> 2 bips <input type="checkbox"/> Série de bips |
| <input type="checkbox"/> Off <input type="checkbox"/> Automatique <input type="checkbox"/> Manuel | <input type="checkbox"/> Vocal <input type="checkbox"/> 3 bips <input type="checkbox"/> Série de bips |
| <input type="checkbox"/> Off <input type="checkbox"/> Automatique <input type="checkbox"/> Manuel | <input type="checkbox"/> Vocal <input type="checkbox"/> 4 bips <input type="checkbox"/> Série de bips |
| - | <input type="checkbox"/> Vocal <input type="checkbox"/> 4 bips <input type="checkbox"/> Série de bips |
| - | <input type="checkbox"/> Bip continu |
| - | <input type="checkbox"/> Vocal <input type="checkbox"/> Série de bips |
| - | <input type="checkbox"/> Vocal <input type="checkbox"/> Série de bips |


ENTRETIEN JOURNALIER

La prévention et l'entretien régulier de votre aide auditive vous assureront une durée de vie avec un minimum de trouble de fonctionnement. La chaleur, l'humidité et les corps étrangers peuvent s'accumuler et diminuer ses performances ou interrompre son fonctionnement.


- Vérifiez et nettoyez votre aide auditive tous les jours au-dessus d'une table recouverte d'un tissu propre. Vous protégerez ainsi votre aide auditive des chocs si elle vous échappe des mains.
- Utilisez une brosse pour retirer les traces de cérumen et autres particules qui peuvent s'accumuler autour des réglages et du tiroir pile.
- N'utilisez jamais d'eau, de solvant, d'huile ou de produit de nettoyage non recommandés par votre audioprothésiste pour nettoyer votre aide auditive.

Votre audioprothésiste peut vous fournir des informations supplémentaires sur l'entretien de votre aide auditive, si cela est nécessaire.

ENTRETIEN DE L'EMBOUT SUR-MESURE OU STANDARD

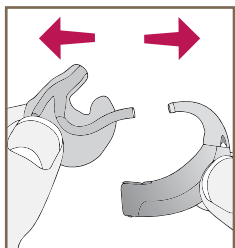

1

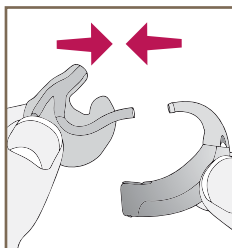

2




1. Détachez l'embout sur-mesure doucement de l'aide auditive. En appareillage ouvert, vous pouvez retirer l'embout standard ou sur-mesure de la poignée de maintien du tube.
 - Utilisez un linge doux et humide ou une brosse pour retirez les traces de cérumen,
 - Périodiquement, vous pouvez le laver dans de l'eau savonneuse et chaude.
2. Reliez l'embout au mini-contour d'oreille après l'avoir nettoyé.

ENTRETIEN DU TUBE EN APPAREILLAGE OUVERT


1. Pour nettoyer le tube, déclipsez-le en tirant sur le cône de connection. **NE PAS TIRER SUR LE TUBE.**
2. Si vous nettoyez en même temps les deux aides auditives, assurez-vous de garder ensemble le tube (gauche ou droit) avec son aide auditive respective.
3. L'épure-tube fourni sert à extraire les éventuels débris. Tenez-le par la poignée et insérez le fil nylon à l'intérieur du tube en l'entrant par le cône de connection.
4. Poussez délicatement le fil nylon sur toute la longueur du tube afin qu'il ressorte à l'autre extrémité. Une fois le cérumen et les particules sortis, tirez sur la poignée de l'épure-tube pour le ressortir. Répétez l'opération plusieurs fois.
5. Remettez le tube en clipsant le mini-contour d'oreille avec le cône de connection.

N'hésitez pas à demander plus d'informations à votre audioprothésiste pour le nettoyage et l'entretien de vos tube et embout.


TUBE EMBOUT STANDARD OU SUR-MESURE

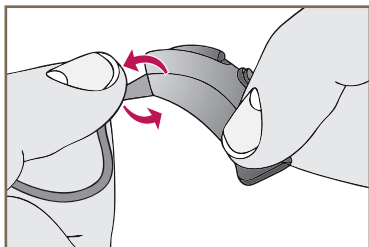


1

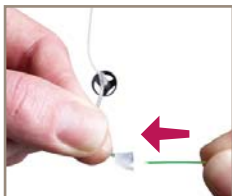

3

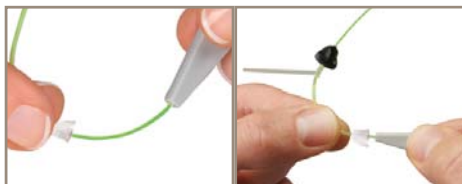

4

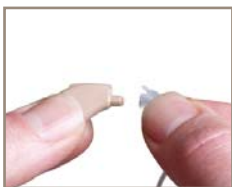

REPLACEMENT DE L'EMBOUT STANDARD ET DU TUBE EN APPAREILLAGE OUVERT

Recommandation : Par mesure d'hygiène et compte tenu du vieillissement du matériau, nous recommandons vivement de changer l'embout standard et le tube toutes les 6 à 8 semaines ou selon les conseils donnés par votre audioprothésiste.

Prévention

- Quand vous ne portez pas votre aide auditive, ouvrez le tiroir pile pour éviter tout risque d'humidité.
- Quand vous n'utilisez pas votre aide auditive pendant un long moment, enlevez la pile du tiroir pile et rangez votre aide auditive dans son écrin :
 - Dans un endroit frais, sec et sûr,
 - En dehors d'une source directe de lumière ou de chaleur,
 - Dans un endroit où vous pouvez facilement la trouver,
 - Dans un endroit différent de celui de vos médicaments,
 - A l'abri des enfants, des handicapés mentaux ou des animaux domestiques.

SERVICE APRES-VENTE

Quelque soit la raison, si votre aide auditive ne fonctionne plus, n'essayez pas de la réparer vous-même. Non seulement vous ne pourriez plus bénéficier des garanties et assurances mais surtout vous pourriez gravement la détériorer.

Si votre aide auditive tombe en panne ou si elle ne vous apporte pas satisfaction, consultez en premier lieu votre guide d'utilisation (page suivante) pour les solutions possibles. Si les problèmes persistent, n'hésitez pas à consulter votre audioprothésiste.

Même si vous êtes en déplacement loin de votre domicile, n'importe quel audioprothésiste se fera un plaisir de vous aider. Il pourra peut-être résoudre vos problèmes directement dans son laboratoire.

PROBLEMES ET SOLUTIONS

| SYMPTOMES | CAUSES POSSIBLES | SOLUTIONS |
|------------------------------------|---|---|
| Le son n'est pas assez fort | La pile est faible | Remplacez la pile |
| | L'entrée micro et la sortie écouteur sont obstruées | Nettoyez l'entrée micro et la sortie écouteur à l'aide de la brosse |
| | L'audition a changé | Consultez votre audioprothésiste |
| Amplification instable | La pile est faible | Remplacez la pile |
| | L'embout/tube est bouché | Débouchez à l'aide de la brosse et nettoyez |
| Le son n'est pas clair et distordu | La pile est faible | Remplacez la pile |
| | L'embout/tube est bouché | Débouchez et nettoyez |
| | L'aide auditive est en panne | Consultez votre audioprothésiste |
| L'aide auditive ne fonctionne plus | La pile est usagée | Remplacez la pile |
| | L'embout/tube est bouché | Nettoyez l'entrée micro et la sortie écouteur à l'aide de la brosse |
| | Le tube est endommagé | Consultez votre audioprothésiste |

Grâce à votre appareillage auditif, vous allez à nouveau stimuler votre audition. Dans un premier temps, utilisez votre aide auditive seulement dans des environnements familiers et calmes où vous pourrez identifier et localiser des bruits simples (écoulements d'eau, claquements de porte, chants d'oiseaux...) que vous n'avez plus entendus depuis quelque temps.

D'autres sons, comme votre propre voix seront différents. Dans le même environnement calme, exercez-vous à écouter et à converser avec une personne dont la voix vous est familière et placez-la face à vous.

La lecture sur les lèvres, les expressions du visage et les gestes des autres peuvent améliorer notre manière d'apprendre, ce que seule l'amplification de sons ne peut fournir.

Rappelez-vous que la plupart des gens ne savent pas et ne peuvent pas voir votre problème d'audition. Il existe des moyens non-verbaux encourageant les autres à vous faire face quand ils parlent plus doucement. Votre famille et vos amis sont également affectés par votre problème d'audition, faites-leur connaître vos besoins afin qu'ils vous aident.

- Assurez-vous de pouvoir voir le visage et les expressions de votre interlocuteur.
- Votre interlocuteur doit avoir toute votre attention et vous pouvez regarder son visage quand il parle.
- Votre interlocuteur doit parler normalement, naturellement et clairement plutôt que plus fort.
- Faites reformuler plutôt que répéter les mêmes mots si vous n'avez pas compris la première fois.
- Si vous allez dans des lieux publics tels que l'église ou des meetings, asseyez-vous près et suivant une bonne distance de vision de l'orateur.
- Les ambiances sonores peuvent également vous distraire. Par exemple, tenir une conversation pendant que la télévision fonctionne.
- Utilisez votre aide auditive de façon progressive jusqu'au moment de sa complète intégration dans votre vie de tous les jours.

Votre patience et votre bonne volonté seront largement responsables du succès de votre appareillage.

- En protégeant et en maintenant la qualité de votre aide auditive, cela vous aidera à en tirer toujours le meilleur profit.
- Quand vous n'utilisez pas votre aide auditive, rangez-la dans un endroit différent de celui de vos médicaments et ne la laissez pas à la portée des enfants, des handicapés mentaux ou des animaux domestiques.
- N'insérez jamais de produits liquides dans votre aide auditive car vous risqueriez d'affecter son bon fonctionnement.
- Protégez votre aide auditive des sources de chaleur et de la lumière directe.
- Protégez votre aide auditive contre les chutes ou les chocs. Nettoyez-la quotidiennement et changez vos piles régulièrement.
- Protégez votre aide auditive des produits de nettoyage chimiques, de la laque pour cheveux ou du parfum.
- N'essayez jamais de réparer votre aide auditive. Il est préférable de consulter votre audioprothésiste.

Soyez assuré que nous allons avec votre audioprothésiste, vous aider à obtenir entière satisfaction.



Si vous rendez visite à votre audioprothésiste pour acheter des piles, profitez de votre visite pour effectuer une vérification de votre aide auditive et un examen de votre audition si nécessaire, ce qui nous permettra de vous garantir le meilleur bien-être auditif possible.

Vous avez peut-être des amis ou des connaissances qui rencontrent des difficultés à communiquer. Encouragez-les à faire un examen audioprothétique auprès d'un audioprothésiste.

Personne ne devrait négliger son audition, d'autant plus que l'on peut bénéficier de la nouvelle technologie auditive actuelle.

La garantie couvre tous les vices de fabrication constatés et reconnus par notre service technique. Elle donne droit au remplacement des pièces défectueuses. La garantie ne couvre pas les défauts de fonctionnement qui proviennent d'un mauvais entretien, d'un choc ou d'un démontage en dehors de nos services techniques.

Sont exclus : les piles ainsi que les dégâts causés par celles-ci. Toute réparation effectuée en dehors de nos services techniques pendant la durée de la garantie et toute utilisation non prévue dans ce guide entraînent immédiatement la fin de la garantie.

L'acheteur bénéficie de la garantie des vices cachés conformément à l'article 1641 du Code Civil. Les aides auditives voyagent aux risques et périls de l'expéditeur.

Fabricant :

Starkey Laboratories, Inc. 6700
Washington Avenue South
Eden Prairies Minnesota
MN 55344 USA

Représentant Européen :

Starkey Laboratories, Ltd.
William F. Austin House
Bramhall Technology Park Hazel
Grove Stockport, Cheshire,
United Kingdom SVK7 5BX

Distributeur :

Starkey France
23 Rue Claude Nicolas Ledoux
Zone Europarc
94000 CRETEIL
FRANCE

