



Oreillette Bluetooth®



Guide d'utilisation

Sommaire

Introduction.....	1
Caractéristiques principales.....	2
Présentation des profils mains-libres.....	4
Chargement de la batterie.....	5
Utilisation courante	
Insertion/Extraction.....	6
Coude contour d'oreille.....	8
Couplage & connexion avec votre téléphone . portable.....	9
Répondre & raccrocher.....	10
Générer un appel.....	11
Entretien journalier et prévention.....	12
Garantie.....	13
Caractéristiques techniques.....	14
Partenariat.....	15
Informations réglementaires.....	16
Notes.....	17

Le SoundPort est conçu pour permettre une communication «mains-libres» avec une très bonne qualité sonore via votre téléphone portable compatible Bluetooth®.



Pour utiliser un téléphone portable avec SoundPort, celui-ci doit impérativement être doté de la technologie sans fil Bluetooth® et supporté soit le profil «mains-libres» soit le profil «kit piéton».

Caractéristiques principales



Caractéristiques principales

- 1 Interrupteur Marche/Arrêt
Arrête ou met en marche le SoundPort
- 2 Bouton d'appel
Permet de répondre et de finir un appel
- 3 Bouton de volume "plus"
Augmente le volume de la communication
- 4 Bouton de volume "moins"
Réduit le volume de la communication
- 5 Diode lumineuse
Indique le statut du SoundPort
- 6 Embout
Réalisé sur mesure par un spécialiste
- 7 Microphone
Microphone réducteur de bruit
- 8 Prise d'alimentation
Prévue pour recevoir la prise Jack d'alimentation

Présentation des profils “mains-libres”

Les appareils électroniques compatibles Bluetooth® sont conçus pour fonctionner avec un des 13 “profils” standards prévus pour la communication sans fil. Deux d’entre eux sont communément utilisés pour les téléphones portables.

Profil “mains-libres” (téléphonie sans fil)

Définit qu’un téléphone sans fil peut communiquer avec la technologie Bluetooth®. Désigne aussi qu’un téléphone portable standard peut être rendu compatible Bluetooth® en utilisant un adaptateur approprié. Souvent utilisé avec les kits mains-libres pour permettre de communiquer avec un téléphone portable.

Profil “Oreillette”

Définit qu’une oreillette Bluetooth® doit pouvoir communiquer avec un téléphone ou un ordinateur. C’est le profil le plus couramment utilisé capable de fonctionner avec la majorité des oreillettes connectées, la possibilité de répondre aux appels, raccrocher, sonner et régler le volume de la communication.

Chargement de la batterie

Le SoundPort est doté d'une batterie lithium-polymer rechargeable. La pleine charge offre une autonomie de 240 heures en veille et 7 heures en communication.

Avant d'utiliser votre SoundPort pour la première fois, vous devez charger la batterie en totalité. Pour cela, connectez le transformateur à l'adaptateur secteur approprié (selon le pays où vous vous trouvez).

La diode rouge du SoundPort s'allume jusqu'à ce que le module soit chargé totalement. A ce moment, la diode s'éteint pour indiquer le chargement complet du module qui se réalise en 2 h environ.

Etape 1 Connectez le câble d'alimentation à l'oreillette.

Etape 2 La diode rouge s'allume pendant toute la durée du chargement.

Etape 3 La diode rouge s'éteint lorsque la charge est complète.

Temps d'utilisation, de chargement et Indicateur			
Veille	Communication	Chargement	Indicateur
240 heures	7 heures max.	2 heures	Rouge

Insertion/Extraction

Avant d'insérer votre oreillette, connectez-la à votre embout sur mesure. Pour positionner votre oreillette, tenez-la par l'écouteur entre le pouce et l'index. Insérez doucement le conduit de l'embout sur mesure dans votre conduit auditif. Puis poussez-le à sa place avec le bout du doigt.





Pour extraire votre oreillette, maintenez l'embout de l'oreillette entre le pouce et l'index puis tirez doucement.

Coude contour d'oreille

L'utilisation du coude contour d'oreille n'est pas nécessaire. Cependant, si vous choisissez de l'utiliser, fixez-le sur l'arrière de l'oreillette afin qu'elle s'adapte à votre oreille droite ou gauche.



Pointez la partie arrière de l'oreillette vers le bas puis placez le bout du crochet du coude sur le côté gauche du support de fixation.



Poussez-le ensuite doucement pour le clipper sur le support.

Pour utiliser l'oreillette SoundPort sur l'autre oreille, inversez simplement le crochet du coude sur le support de fixation.

Pour pouvoir utiliser l'oreillette SoundPort avec votre téléphone portable, les deux appareils doivent être "couplés" puis "connectés". Le couplage est le processus où deux dispositifs Bluetooth® s'identifient l'un l'autre comme capables de partager des données numériques et de les échanger par transmission sans fil Bluetooth®. La connexion signifie que les deux dispositifs peuvent échanger des données comme si elles étaient reliées par un câble invisible.

Etape 1 Assurez-vous que l'oreillette soit éteinte. Pour cela, maintenez l'interrupteur enfoncé pendant 3 secondes, le module s'éteint comme l'indique la diode en clignotant 3 fois en rouge.

Etape 2 Maintenez l'interrupteur enfoncé pendant 7 secondes, jusqu'à ce que la diode clignote rouge et vert alternativement.

Etape 3 L'oreillette est maintenant en mode couplage et peut donc être détectée par votre téléphone. Elle conservera cet état pendant 1 minute.

Ajoutez l'oreillette SoundPort à la liste des périphériques de votre téléphone en suivant la procédure liée à celui-ci. Lorsque le téléphone requiert un code pour enregistrer le périphérique, entrez "0000".

Utilisation avec votre téléphone portable

Répondre à un appel

Etape 1 Lorsqu'un appel arrive sur votre téléphone portable, que l'oreillette est connectée et que la fonction Bluetooth® est activée, la sonnerie retentira directement dans votre oreillette.

Etape 2 Pour répondre, appuyez brièvement mais fermement sur l'interrupteur.

Etape 3 Pour refuser l'appel, enfoncez l'interrupteur plusieurs secondes (pour les téléphones avec profil mains-libres).

Au cours d'un appel

Changer le volume	Pressez sur Vol + Vol -
Désactiver le microphone	Pressez rapidement sur l'interrupteur Marche/Arrêt
Ré-activer le microphone	Pressez rapidement sur l'interrupteur Marche/Arrêt
Terminer un appel	Pressez rapidement sur le bouton d'appel

Générer un appel

L'oreillette SoundPort ne dispose pas d'un clavier. Vous devez donc utiliser celui de votre téléphone ou la commande vocale si celui-ci en est équipé pour générer un appel. Pour utiliser la commande vocale, vous devez tout d'abord associer un enregistrement vocal correspondant au contact souhaité. Pour plus de détails, reportez-vous au mode d'emploi de votre téléphone.

Etape 1 Enregistrez ou sélectionnez le contact (voir mode d'emploi du téléphone).

Etape 2 Pressez le bouton d'appel.

Etape 3 Attendez le bip sonore et prononcez le nom de la personne que vous souhaitez appeler.

Votre embout auriculaire sur mesure doit être nettoyé régulièrement avec un linge doux et humide. Frottez la surface et assurez-vous que la sortie du son et l'aération ne soient pas obstruées.

Périodiquement, vous pouvez le laver dans de l'eau chaude et savonneuse. N'oubliez pas de détacher l'oreillette et de l'éloigner de l'humidité avant de nettoyer l'embout. N'utilisez jamais de solvant, d'huile ou de produit de nettoyage non recommandés par votre audioprothésiste pour nettoyer votre oreillette ou votre embout. Pour sécher votre embout, utilisez une bombe d'air ou disposez-le sur une serviette pour permettre le séchage naturellement. Également, ne laissez pas votre oreillette dans la poche d'un vêtement qui va être lavé ou nettoyé. Si elle est mouillée, n'essayez pas de la sécher dans le four, le four micro-onde ou avec un sèche-cheveux car la chaleur peut l'endommager sérieusement. Gardez votre embout hors de portée des animaux domestiques et des enfants. Votre oreillette peut être si confortable que vous pouvez l'oublier. Prenez l'habitude de la retirer avant de prendre une douche, d'aller à la piscine ou avant tout contact avec l'eau.

Il est conseillé d'effectuer toutes les opérations de nettoyage au-dessus d'une table recouverte d'un tissu propre. Vous protégerez ainsi votre oreillette et votre embout des chocs s'ils vous échappent des mains.

Merci d'avoir choisi un produit Stakey. Nous vous recommandons de conserver ce document avec la facture qui vous a été remise par le revendeur afin de pouvoir bénéficier de la garantie.

1. Le SoundPort bénéficie d'une garantie d'un an qui démarre le jour de votre achat. La garantie couvre tous les vices de fabrication constatés et reconnus par notre service technique. Elle donne droit au remplacement des pièces défectueuses. La garantie ne couvre pas les défauts de fonctionnement qui proviennent d'un mauvais entretien, d'un choc ou d'un démontage en dehors de nos services techniques. Toute réparation effectuée en dehors de nos services techniques pendant la durée de la garantie et toute utilisation non prévue dans ce guide entraînent immédiatement la fin de la garantie. La garantie sera appliquée sur présentation de la facture comportant le numéro de série de l'oreillette et l'oreillette.
2. Une garantie limitée engageant une participation financière de l'utilisateur sera appliquée dans les cas suivants : usure normale, dommages causés par accident ou catastrophe naturelle, mauvaise utilisation, contact avec un liquide, mauvaise source ou tension d'alimentation.

Caractéristiques techniques

Profil Bluetooth®	compatible version 1.1
Fréquences de transmission	2.4 ~ 2.4835 GHz (Bandes ISM)
Distance de transmission	10 m (Classe 2)
Autonomie de communication	7 heures
Autonomie en veille	240 heures
Temps de chargement complet	2 heures
Temps de fonctionnement	-20° C ~ 70° C
Hygrométrie de fonctionnement	5% ~ 95% RH
Poids	18 grammes

L'oreillette Bluetooth® SoundPort est un dispositif de haute technologie qui permet d'utiliser votre téléphone portable en mode mains-libres. Un embout sur mesure vous a été fourni par un audioprothésiste, spécialiste de l'audition, pour optimiser la qualité sonore et le confort du SoundPort. Soyez assuré que nous allons avec votre audioprothésiste, vous aider à obtenir entière satisfaction.

N'hésitez pas à lui demander des informations supplémentaires sur l'utilisation de l'oreillette, l'embout sur mesure ou votre audition. Nous vous conseillons de faire contrôler régulièrement votre embout,



vosre SoundPort et votre audition si nécessaire, ce qui nous permettra de vous garantir le meilleur bien-être auditif possible. Vous avez peut-être des amis ou des connaissances qui rencontrent des difficultés à communiquer, encouragez-les à consulter un professionnel de l'audition. Personne ne devrait négliger son audition, d'autant plus qu'aujourd'hui, on peut bénéficier de la nouvelle technologie auditive.

Starkey déclare que l'oreillette SoundPort est conforme aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes de la Directive 1999/5/EC et 93/42/EEC.

ATTENTION: : tout changement, modification ou intervention non expressément approuvés par les parties responsables peut annuler la capacité de l'utilisateur à utiliser cet appareil.



Fabricant : Starkey Laboratories, Inc. 6700 Washington
Avenue South Eden Prairies Minnesota MN 55344 USA

Représentant Européen : Starkey Laboratories, Ltd.
William F. Austin House Bramhall Technology Park Hazel
Grove Stockport, Cheshire, United Kingdom SVK7 5BX

Distributeur : Starkey France 23 Rue Claude Nicolas
Ledoux Zone Europarc 94000 CRETEIL - FRANCE

CE 0678

