

# Made for iPhone®

RIC (Receiver-In-Canal)

Ecouteur dans le conduit

Contour d'oreille (BTE)



GUIDE D'UTILISATION

# Sommaire

---

<b>Votre aide auditive</b> .....	3
<b>Identification</b> .....	4
<b>Préparation</b>	
La pile .....	6
Indicateur de fin de vie de pile .....	8
<b>Insertion et extraction de l'aide auditive</b> .....	10
<b>Fonctionnement</b>	
Marche/Arrêt et délai de mise en marche .....	17
<b>Ajustement de votre aide auditive</b>	
Jumelage de votre aide auditive à l'appareil iOS .....	18
Ecouter en temps réel .....	22
Contrôle du volume .....	22
Utilisation du téléphone .....	23
<b>Entretien et Prévention</b>	
Entretien journalier .....	24
RIC - Protection pare-cérumen écouteur Hear Clear .....	28
Service Après-vente .....	30
Problèmes et solutions .....	31
<b>Conseils pour une meilleure communication</b> .....	32
<b>Technologie sans-fil</b> (recommandations) .....	34
<b>Rappel</b> .....	37
<b>Garantie</b> .....	38

Votre aide auditive est conçue pour l'iPhone et TruLink. Elle est compatible avec les iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5, iPhone 4s, iPad Air, iPad Air 2, iPad (4<sup>ème</sup> génération), iPad mini avec écran Retina, iPad mini, iPad mini 3 et iPod Touch (5<sup>ème</sup> génération).



**ECOUTEUR  
DANS LE  
CONDUIT (RIC)**

### Configuration

- STANDARD
- PUISSANCE ABSOLUE

### Type d'embout

- Standard
- Sur-mesure
- Sur-mesure Curve
- Sur-mesure Puissance Absolue



**CONTOUR  
D'OREILLE (BTE)**

### Configuration

- STANDARD
- TUBE FIN



### Type d'embout

- Standard
- Sur-mesure

# Identification

## RIC

1. Coque
2. Tube
3. Ecouteur
4. Entrées des Microphones
5. Tiroir pile (Marche/Arrêt)  
Identification par un Numéro de Série.
6. Ergot de rétention
7. Identification par les noms du fabricant et du modèle
8. Indicateur de côté appareil et écouteur (Droit/Gauche)
9. Embout standard dôme
10. Embout sur-mesure
11. Ecouteur sur-mesure  
PUISSANCE ABSOLUE

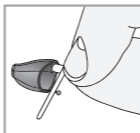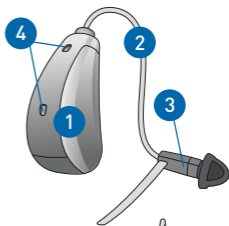

10




11

Pile 13 ● Orange

## Contour d'oreille

1. Coque
2. Coude - Sortie Ecouteur
3. Entrées des Microphones
4. Bouton-poussoir Multiprogrammes
5. Tiroir pile (Marche/Arrêt)  
Identification par un Numéro de Série
6. Indicateur de côté (Droit/Gauche)
7. Identification par les noms du fabricant et du modèle
8. Configuration standard avec embout sur-mesure
9. Configuration tube fin avec embout standard dôme
10. Configuration tube fin avec embout sur-mesure

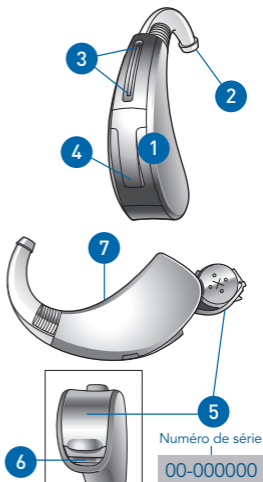

Pile 13 ● Orange

# Préparation

---

## La pile

Votre aide auditive utilise une pile de type Zinc Air. La taille de la pile est identifiée par un code de couleur sur l'emballage des piles. Assurez-vous que le type et le modèle soient corrects.

RIC : **13** ● Orange

Contour d'oreille : **13** ● Orange

## Insertion et extraction de la pile

Il est conseillé de changer la pile au-dessus d'une table ou d'un bureau afin de supprimer les risques de chute.






1. Ouvrez doucement le tiroir pile avec le doigt.
2. Tirez doucement vers le bas puis retirez la pile usagée.

**Ne pas ouvrir le tiroir pile trop fort, cela risquerait de l'endommager.**






3. Retirez l'étiquette adhésive de la pile neuve.
4. Placez le côté "+" de la pile du même côté que celui gravé dans le rebord du tiroir pile.
5. Fermez doucement et complètement le tiroir pile. **Ne pas forcer la fermeture du tiroir pile.**

Si le tiroir pile ne ferme pas complètement, vérifiez si la pile est insérée dans le bon sens. Si le problème persiste, consultez votre audioprothésiste. Il saura vérifier les type et modèle de pile que vous utilisez et qui peuvent fournir des performances différentes.

## ECOUTEUR DANS LE CONDUIT (RIC)

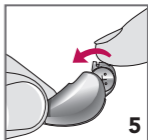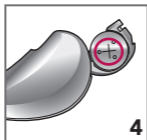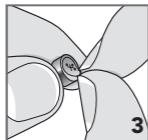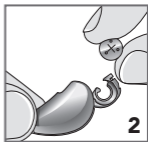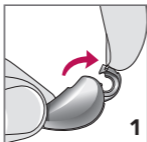

## CONTOUR D'OREILLE (BTE)

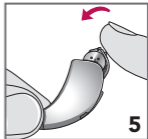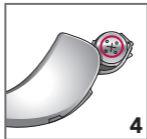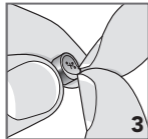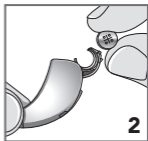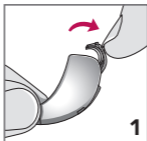

## Préparation

---

### Indicateur de fin de vie de pile

Un indicateur sonore sera émis quand le voltage de la pile faiblira. Vous aurez environ 20 minutes\* pour la remplacer, faites-le dès que vous entendez ce signal. Quand la pile sera trop faible pour faire fonctionner l'aide auditive, vous entendrez un bip pendant 2 secondes et l'appareil s'arrêtera.

*\* Le temps disponible entre la pile faible et la fin de vie de la pile dépendra du niveau sonore ambiant.*

### Prévention

- **NE JAMAIS FORCER LA FERMETURE DU TIROIR PILE.** Si le tiroir pile ne ferme pas complètement, vérifiez si la pile est insérée dans le bon sens du tiroir pile.
- **NE PAS OUVRIR LE TIROIR PILE TROP FORT, CELA RISQUERAIT DE L'ENDOMMAGER.**
- Il est conseillé de changer la pile au-dessus d'une table ou d'un bureau afin de supprimer les risques de chute.
- Apportez les piles usagées dans les lieux spécialement destinés aux traitements des déchets spéciaux.
- Consultez votre audioprothésiste en cas de problème avec la pile. Il saura vérifier le type et modèle que vous utilisez et qui peuvent fournir des performances différentes.



**ATTENTION : Avaler une pile peut entraîner des dommages sur votre santé.**

- ⚠ Assurez-vous que les piles ne soient pas à la portée des enfants, des handicapés mentaux ou des animaux domestiques.
- ⚠ Afin de ne pas risquer de confondre les piles avec vos médicaments, rangez-les dans un endroit différent.
- ⚠ Ne jamais mettre de pile dans la bouche afin de ne pas risquer de l'avaler. Ne jamais lécher une pile car cela peut provoquer de sérieuses brûlures et une intoxication.
- ⚠ **Consultez immédiatement un médecin en cas de brûlures causées par le léchage d'une pile et en cas de pile avalée.**

# Insertion et Extraction de l'aide auditive

---

## Ecouteur dans le conduit (RIC)

### Insertion


1. Tenez le tube entre le pouce et l'index du côté de l'embout puis insérez-le doucement dans votre conduit auditif.
2. Placez doucement l'aide auditive derrière le pavillon en faisant attention de ne pas tordre le tube.



## Insertion et Extraction de l'aide auditive

---

3. Avec le bout du doigt, placez l'ergot de rétention dans le fond de votre pavillon. Auparavant, afin de faciliter la mise en place, vous pouvez assouplir et arrondir l'ergot de rétention en le maintenant entre le pouce et l'index.

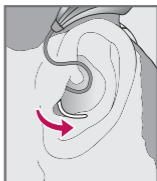

### Extraction

1. Retirez l'ergot de rétention.
2. Retirez l'aide auditive. Ne pas enlever l'aide auditive en tirant sur la coque, vous risquez d'endommager la connection tube/coque.
3. Attrapez le tube par la partie la plus épaisse, là où l'ergot de rétention rejoint le tube. Tirez-le délicatement jusqu'à extraction complète de l'embout.



# Insertion et Extraction de l'aide auditive


---

## Contour d'oreille (BTE)

### Configuration standard avec embout sur-mesure

#### Insertion


1. Tenez le tube entre le pouce et l'index du côté de l'embout puis insérez-le doucement dans votre conduit auditif.
2. Insérez doucement le conduit de l'embout dans votre conduit auditif et ajustez son positionnement.

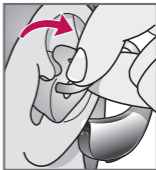

## Insertion et Extraction de l'aide auditive

---

3. Poussez l'embout à sa place avec le bout du doigt.
4. Placez doucement le contour derrière le pavillon en faisant attention de ne pas tordre le tube.

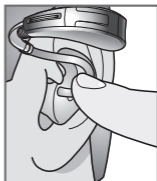

### Extraction

Attrapez l'embout dans le conduit auditif et tirez-le doucement hors de l'oreille. Vous pouvez faciliter l'extraction de l'embout en tirant le lobe de l'oreille vers le bas entre le pouce et l'index.



**NE TIREZ PAS SUR LE TUBE.**



## Contour d'oreille (BTE)

### Configuration tube fin avec embout standard ou sur-mesure

#### Insertion

1. Tenez la poignée de maintien entre le pouce et l'index, du côté externe près du tube reliant l'embout au contour.


Insérez doucement l'embout dans votre conduit auditif. Puis poussez l'embout à sa place avec le bout du doigt.

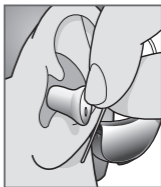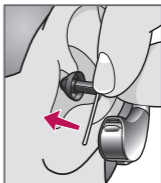

## Insertion et Extraction de l'aide auditive

---

2. Placez doucement l'aide auditive derrière le pavillon en faisant attention de ne pas tordre le tube.
3. Avec le bout du doigt, placez l'ergot de rétention dans le fond de votre pavillon. Auparavant, afin de faciliter la mise en place, vous pouvez assouplir et arrondir l'ergot de rétention en le maintenant entre le pouce et l'index. Assurez-vous que l'ergot soit correctement placé dans le fond du pavillon en le poussant du bout du doigt.

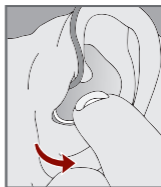

### Extraction

Retirez tout d'abord l'ergot puis attrapez la poignée de maintien. Tirez délicatement jusqu'à extraction complète.

**NE TIREZ PAS SUR LE TUBE.**

## Insertion et Extraction de l'aide auditive

---

### Prévention

- Une légère irritation ou échauffement peut survenir dans le conduit auditif externe. Cela peut être causé par la pression de l'embout (sur-mesure) sur les parois et sera facilement rectifié par votre audioprothésiste. Consultez votre audioprothésiste.
- Consultez votre audioprothésiste, en cas de manifestation allergique, celui-ci a le choix entre différents matériaux.
- Consultez rapidement un médecin, en cas de réaction sévère, d'écoulement, de sécrétion de cérumen excessive ou toute autre manifestation anormale.



### Marche/Arrêt

**Mise en marche** : insérez une pile dans le tiroir pile et fermez-le complètement.

**Arrêt** : ouvrez le tiroir pile complètement pour éviter tout contact entre la pile et les contacts pile.

### Délai de mise en marche

Votre aide auditive est programmée avec un délai de mise en marche. Ceci vous permet de disposer de quelques secondes pour mettre votre aide auditive en place avant qu'elle soit mise sous tension.

### Ajustement de votre aide auditive

Votre aide auditive est conçue pour l'iPhone et TruLink. Elle est compatible avec les iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5, iPhone 4s, iPad Air, iPad Air 2, iPad (4<sup>ème</sup> génération), iPad mini avec écran Retina, iPad mini, iPad mini 3 et iPod Touch (5<sup>ème</sup> génération).

#### **Pour ajuster votre aide auditive avec votre appareil iOS :**

- Assurez-vous que celui-ci utilise le système d'exploitation iOS 7.1 ou une version supérieure.
- Téléchargez **l'appli TruLink™ Hearing Control** sur l'App Store d'iTunes® ou utilisez le système iOS natif sur votre appareil (voir la rubrique ci-dessous **Jumelage de votre aide auditive à l'appareil iOS**).

Pour en savoir plus sur les fonctionnalités de votre aide auditive avec l'appli TruLink, ouvrez l'appli et appuyez sur l'icône *i*. Vous y trouverez des instructions détaillées.



#### **Jumelage de votre aide auditive à l'appareil iOS**

Pour ajuster votre aide auditive avec votre appareil, vous devez jumeler les deux pour qu'ils puissent communiquer. Veuillez suivre les instructions pour jumeler votre ou vos aides auditives à votre appareil iOS.

**IMPORTANT** : Avant d'effectuer les étapes suivantes, assurez-vous que le paramètre **Bluetooth®** situé dans le menu **Réglages** sur votre appareil iOS, soit activé (position oui).




1. Dans le menu **Réglages**, allez dans le menu **Général** puis dans le menu **Accessibilité**.

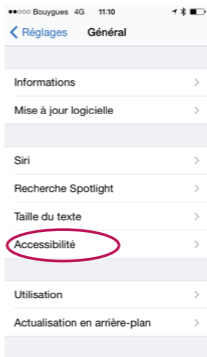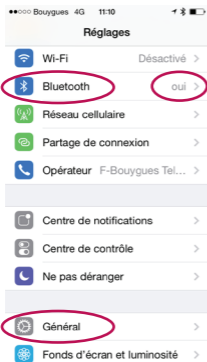

## Fonctionnement

---

2. Dans le menu **Accessibilité**, allez dans celui de **Appareils auditifs**.
3. Pendant que votre appareil iOS recherche les aides auditives, ouvrez et fermez le tiroir pile de vos aides auditives, (cela fait passer les aides auditives en mode jumelage).

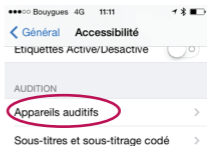


- 4a. Vous verrez apparaître votre nom suivi de appareil auditif c'est-à-dire : («**Mathieu Appareil auditif**» ou «**Mathieu H/As**» en fonction de la longueur du nom) lorsque l'appareil iOS découvrira pour la première fois les aides auditives.



- 4b. Si votre nom n'apparaît pas dans la «Liste des appareils» au bout de 5 à 7 secondes, appuyez sur **Accessibilité** en haut à gauche, puis sur **Appareils auditifs**.
5. Appuyez sur le **Nom de l'appareil auditif** pour connecter les aides auditives à l'appareil iOS.

- Vous verrez apparaître deux demandes de confirmation de jumelage (une pour chaque aide auditive). Sélectionner **Jumeler** dans les deux cas. Ces demandes de confirmation peuvent se succéder à quelques secondes d'intervalle.
- Le jumelage est terminé.

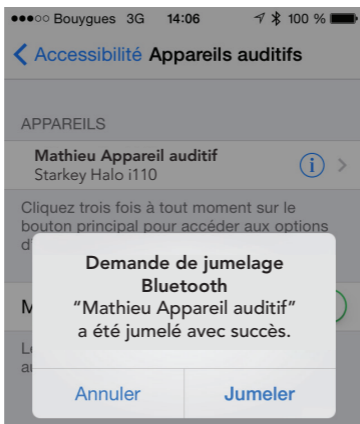

## Fonctionnement

---

Vous pouvez désormais utiliser votre appareil iOS pour ajuster vos aides auditives, soit avec les réglages iOS natifs soit avec **l'appli TruLink**.

Pour accéder aux réglages iOS natifs des aides auditives, triple cliquez sur le bouton **Accueil** de votre appareil iOS. Sur cet écran, vous pouvez régler le volume, sélectionner un programme ou utiliser votre appareil iOS comme microphone externe.

### Ecouter en temps réel

Sélectionnez **Ecouter en temps réel** pour transmettre directement les sons captés par le micro de votre appareil iOS dans vos aides auditives. Dirigez le micro de l'appareil iOS vers la source qui vous intéresse pour un meilleur résultat. Pour minimiser les bruits de fonds et maximiser le signal, placez l'appareil iOS aussi près que possible de la source.

### Contrôle du volume

**Volume à droite / Volume à gauche** : vous permet d'augmenter et de diminuer le volume sur chaque appareil indépendamment.

**Volume G + D** : vous permet de régler les deux appareils simultanément.

**Normal** : indique le nom d'un programme sur l'aide auditive. Vous pouvez sélectionner le programme de votre choix dans la liste pour régler les aides auditives sur ce programme.

### Utilisation du téléphone

Vos aides auditives sont conçues pour fonctionner avec l'iPhone. Lorsque celles-ci sont jumelées à l'iPhone et en marche, les appels téléphoniques entrants sont automatiquement transmis dans vos aides auditives.

Lorsque celles-ci sont éteintes, les appels entrants sont uniquement transmis à l'iPhone. Il se peut qu'une invite de commande s'affiche pour vous demander de choisir entre l'iPhone et les aides auditives avant de passer un appel sortant, si les aides auditives sont en marche.

### Entretien journalier

La prévention et l'entretien régulier de votre aide auditive vous assureront une durée de vie avec un minimum de trouble de fonctionnement. La chaleur, l'humidité et les corps étrangers peuvent s'accumuler et diminuer ses performances ou interrompre son fonctionnement.

- Vérifiez et nettoyez votre aide auditive ainsi que l'embout sur-mesure tous les jours au-dessus d'une table recouverte d'un tissu propre. Vous protégerez ainsi votre aide auditive des chocs si elle vous échappe des mains.
- Utilisez un linge doux et humide ou une lingette pour retirer les traces de cérumen et autres particules qui peuvent s'accumuler sur la coque, autour des réglages ou du tiroir pile.

**RIC** : Examinez régulièrement l'écouteur, l'embout dôme ou sur-mesure ainsi que la protection pare-cérumen qui pourraient se déboîter de l'écouteur ou de l'embout. Si tel était le cas, contactez immédiatement votre audioprothésiste afin qu'il effectue un examen de votre conduit auditif par otoscopie.

Votre audioprothésiste peut vous fournir des informations supplémentaires sur l'entretien de votre aide auditive, si cela est nécessaire.



**Recommandation** : Par mesure d'hygiène et compte tenu du vieillissement du matériau, nous recommandons vivement de changer l'embout dôme toutes les 6 à 8 semaines ou selon les conseils donnés par votre audioprothésiste.

### Prévention

- Quand vous ne portez pas votre aide auditive, ouvrez le tiroir pile pour éviter tout risque d'humidité.
- Quand vous n'utilisez pas votre aide auditive pendant un long moment, enlevez la pile du tiroir pile et rangez votre aide auditive dans son écrin :
  - Dans un endroit frais, sec et sûr,
  - En dehors d'une source directe de lumière ou de chaleur,
  - Dans un endroit où vous pouvez facilement la trouver, ou différent de celui de vos médicaments.
  - A l'abri des enfants, des handicapés mentaux ou des animaux domestiques.
- N'utilisez jamais d'eau, de solvant, d'huile ou de produit de nettoyage non recommandés par votre audioprothésiste pour nettoyer votre aide auditive.
- Protégez votre aide auditive des produits de nettoyage chimiques, de la laque pour cheveux ou du parfum.
- N'insérez jamais de produits liquides dans votre aide auditive car vous risqueriez d'affecter son bon fonctionnement.


### Contour d'oreille

#### Entretien de l'embout sur-mesure ou standard

1. Détachez l'embout sur-mesure doucement de l'aide auditive. En configuration tube fin, vous pouvez retirer l'embout dôme ou sur-mesure de la poignée de maintien du tube fin.


- Utilisez un linge doux et humide ou une lingette pour retirer les traces de cérumen.
- Périodiquement, vous pouvez le laver dans de l'eau savonneuse et chaude.

2. Reliez l'embout au contour d'oreille après l'avoir nettoyé.


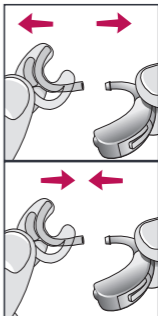


#### Entretien du tube en configuration tube fin

1. Pour nettoyer le tube, déclipez-le en tirant sur le cône de connexion. **NE TIREZ PAS SUR LE TUBE.**

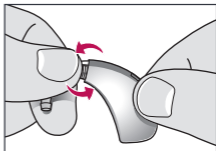

2. Si vous nettoyez en même temps les deux aides auditives, assurez-vous de garder ensemble le tube (gauche ou droit) avec son aide auditive respective.
3. L'épure-tube fourni sert à extraire les éventuels débris. Tenez-le par la poignée et insérez le fil nylon à l'intérieur du tube en l'entrant par le cône de connexion.
4. Poussez délicatement le fil nylon sur toute la longueur du tube afin qu'il ressorte à l'autre extrémité. Une fois le cérumen et les particules sortis, tirez sur la poignée de l'épure-tube pour le ressortir. Répétez l'opération plusieurs fois.
5. Remettez le tube en clipsant le contour d'oreille avec le cône de connexion.

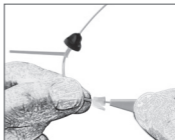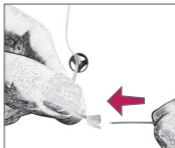

### RIC - Protection pare-cérumen écouteur Hear Clear

Votre aide auditive est équipée d'une protection pare-cérumen nouvelle technologie Hear Clear située à la sortie de l'écouteur. Hear Clear est dotée de la plus récente technologie. Cette protection repousse l'humidité et crée une barrière qui assure une performance régulière des composants pendant la durée de vie de votre aide auditive.

Elle protège du cérumen, de l'humidité et des corps étrangers qui peuvent s'introduire dans la sortie écouteur de votre aide auditive, ce qui évite tout risque de diminution des performances ou d'interruption de son fonctionnement.


#### Conseils d'utilisation

- N'essayez pas de nettoyer cette protection, elle doit être changée car elle est prévue pour une seule utilisation.
- Pour bénéficier au maximum de l'efficacité de votre aide auditive et par mesure d'hygiène, changer la protection toutes les 2 semaines ou selon les conseils de votre audioprothésiste.
- Utilisez uniquement la barrette pour changer la protection.  
**Ne pas la réutiliser, la jeter après usage.**

### Identification




1. "Côté retrait" de la protection usagée
2. "Côté insertion" de la protection neuve

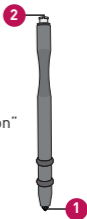

Retirez l'embout puis suivez les instructions ci-dessous pour remplacer la protection.

1. Vissez délicatement le "côté retrait" dans la protection usagée située dans la sortie de l'écouteur.
2. Retirez la barrette qui sera vissée à la protection usagée.
3. Retournez la barrette. Une protection neuve est déjà fixée sur le "côté insertion" de la barrette.
4. Dirigez le "côté insertion" de la barrette dans la sortie écouteur puis pressez délicatement.
5. Retirez la barrette et remettez l'embout. **Puis jetez-la après usage.** L'aide auditive est de nouveau prête à l'emploi.

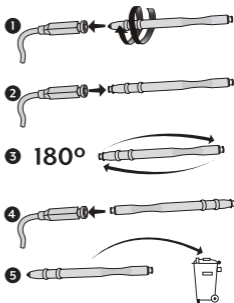

### **ATTENTION**

Si la protection pare-cérumen écouteur Hear Clear se déloge de l'aide auditive et venait à tomber dans votre conduit auditif, consultez immédiatement votre audioprothésiste ou un médecin.

### **Service Après-vente**

Quelque soit la raison, si votre aide auditive ne fonctionne plus, n'essayez pas de la réparer vous-même. Non seulement vous ne pourriez plus bénéficier des garanties et assurances mais surtout vous pourriez gravement la détériorer.

Si votre aide auditive tombe en panne ou si elle ne vous apporte pas satisfaction, consultez en premier lieu votre guide d'utilisation (page suivante) pour les solutions possibles. Si les problèmes persistent, n'hésitez pas à consulter votre audioprothésiste.

Même si vous êtes en déplacement loin de votre domicile, n'importe quel audioprothésiste se fera un plaisir de vous aider. Il pourra peut-être résoudre vos problèmes directement dans son laboratoire.

## Problèmes et solutions

SYMPTOMES	CAUSES POSSIBLES	SOLUTIONS
<b>Le son n'est pas assez fort</b>	La pile est faible	Remplacez la pile
	L'entrée micro et la sortie écouteur sont obstruées	Nettoyez-les
	La protection pare-cérumen est obstruée	Remplacez-la si besoin
	L'audition a changé	Consultez votre audioprothésiste
<b>Amplification instable</b>	La pile est faible	Remplacez la pile
	L'embout/tube est bouché	Débouchez et nettoyez
	La protection pare-cérumen est obstruée	Remplacez-la
<b>Le son n'est pas clair et est distordu</b>	La pile est faible	Remplacez la pile
	L'embout/tube est bouché	Débouchez et nettoyez
	La protection pare-cérumen est obstruée	Remplacez-la
	L'aide auditive est en panne	Consultez votre audioprothésiste
<b>L'aide auditive ne fonctionne plus</b>	La pile est usagée	Remplacez la pile
	L'embout/tube est bouché	Débouchez et nettoyez
	La protection pare-cérumen est obstruée	Remplacez-la
	Le tube est endommagé	Consultez votre audioprothésiste

## Pour une meilleure communication

---

Grâce à votre appareillage auditif, vous allez à nouveau stimuler votre audition. Dans un premier temps, utilisez votre aide auditive seulement dans des environnements familiers et calmes où vous pourrez identifier et localiser des bruits simples (écoulement d'eau, claquements de porte, chants d'oiseaux...) que vous n'avez plus entendus depuis quelques temps.

D'autres sons, comme votre propre voix seront différents. Dans le même environnement calme, exercez-vous à écouter et à converser avec une personne dont la voix vous est familière et placez-la face à vous.

La lecture sur les lèvres, les expressions du visage et les gestes des autres peuvent améliorer notre manière d'apprendre, ce que seule l'amplification de sons ne peut fournir.

Rappelez-vous que la plupart des gens ne savent pas et ne peuvent pas voir votre problème d'audition. Il existe des moyens non-verbaux encourageant les autres à vous faire face quand ils vous parlent plus doucement. Votre famille et vos amis sont également affectés par votre problème d'audition, faites-leur connaître vos besoins afin qu'ils vous aident.



## Pour une meilleure communication

---

- Assurez-vous de pouvoir voir le visage et les expressions de votre interlocuteur.
- Votre interlocuteur doit avoir toute votre attention et vous pouvez regarder son visage quand il parle.
- Votre interlocuteur doit parler normalement, naturellement et clairement plutôt que plus fort.
- Faites reformuler plutôt que répéter les mêmes mots si vous n'avez pas compris la première fois.
- Si vous allez dans des lieux publics tels que l'église ou des meetings, asseyez-vous près et suivant une bonne distance de vision de l'orateur.
- Les ambiances sonores peuvent également vous distraire. Par exemple, tenir une conversation pendant que la télévision fonctionne.
- Utilisez votre aide auditive de façon progressive jusqu'au moment de sa complète intégration dans votre vie de tous les jours.

Votre patience et votre bonne volonté seront largement responsables du succès de votre appareillage.

### Consignes de sécurité

Votre aide auditive répond aux normes internationales les plus exigeantes en matière de compatibilité électromagnétique. Toutefois, il est toujours possible que vous rencontriez des interférences causées par des problèmes de réseaux électriques, des détecteurs de métaux des aéroports, des champs électromagnétiques en provenance de dispositifs médicaux, des signaux de radio ou de décharges électrostatiques.

Si vous utilisez d'autres appareils médicaux tels que stimulateur cardiaque, pacemaker, défibrillateur ou appareil implantable, en cas d'inquiétude, au risque que votre aide auditive puisse potentiellement interférer avec un de ces appareils, contactez votre médecin traitant ou le fabricant de votre appareil médical pour plus d'informations concernant ces risques.

Vous ne devez pas porter votre aide auditive pendant un examen médical IRM (Imagerie par Résonance Magnétique). Votre aide auditive est de classe B applicable au dispositif médical IEC 60601-1.

Votre aide auditive doit être stockée dans des endroits où la température et l'humidité sont de - 40° à + 60° et 10% - 95% rH. Votre aide auditive est conçue pour fonctionner au-delà de la plage de température confortable, soit à une température très froide jusqu'à - 50°.

### Utilisation à bord des avions\*

Comme votre aide auditive est dotée de la technologie sans-fil, vous ne devez donc pas l'utiliser à bord d'un avion sauf permission expresse du personnel de bord. Votre iPhone doit être réglé sur **Mode Avion** ou éteint.

### Utilisation internationale

Votre aide auditive est approuvée pour une fréquence radio qui est spécifique à votre pays ou région et peut ne pas être approuvée en dehors de votre région ou de votre pays. Soyez conscient du fait que l'utilisation au cours d'un voyage international peut occasionner des interférences avec d'autres équipements électroniques, ou que d'autres appareils électroniques peuvent causer des interférences avec votre aide auditive.

*\*Ne s'applique qu'aux aides auditives sans-fil*

# Technologie sans-fil

---

## Certification FCC

### RIC

FCC ID: EOA- 24HALOXF13

IC ID: 6903A- 24HALOXF13

### CONTOUR D'OREILLE

FCC ID: EOA-24HALOBTE13

IC ID: 6903A-24HALOBTE13

Cet appareil est conforme à la section 15 des règlements FCC et à RSS-2-10.

Son utilisation est sujette aux deux conditions suivantes :

1. Cet appareil ne peut causer d'interférences néfastes,
2. Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences susceptibles de causer un mauvais fonctionnement de l'appareil.

**Note** : Le fabricant ne saurait être tenu pour responsable pour une quelconque interférence radio ou télévision causée par des modifications non autorisées de cet équipement. De telles modifications annulent l'autorité de l'utilisateur à utiliser cet appareil.

Starkey déclare par la présente que l'aide auditive sans-fil est conforme aux exigences essentielles et aux autres provisions applicables de la Directive 1999/5/EC.

Une copie de la déclaration de conformité peut être obtenue aux adresses ci-dessous.



Starkey Laboratories, Inc.  
6600 Washington Ave. South  
Eden Prairie, MN USA

Siège social européen  
Starkey Laboratories, Ltd.  
Wm. F. Austin House, Bramhall Technology  
Park Pepper Road, Hazel Grove,  
Stockport SK7 5BX  
Royaume-Uni



Les déchets des appareils électroniques doivent être traités conformément aux règlements locaux.

- En protégeant et en maintenant la qualité de votre aide auditive, cela vous aidera à en tirer toujours le meilleur profit.
- Quand vous n'utilisez pas votre aide auditive, rangez-la dans un endroit différent de celui de vos médicaments et ne la laissez pas à la portée des enfants, des handicapés mentaux ou des animaux domestiques.
- N'insérez jamais de produits liquides dans votre aide auditive car vous risqueriez d'affecter son bon fonctionnement.
- Protégez votre aide auditive des sources de chaleur et de la lumière directe.
- Protégez votre aide auditive contre les chutes ou les chocs. Nettoyez-la quotidiennement et changez la pile régulièrement.
- Protégez votre aide auditive des produits de nettoyage chimiques, de la laque pour cheveux ou du parfum.
- N'essayez jamais de réparer votre aide auditive. Il est préférable de consulter votre audioprothésiste.

## Garantie

---

La garantie couvre tous les vices de fabrication constatés et reconnus par notre service technique. Elle donne droit au remplacement des pièces défectueuses. La garantie ne couvre pas les défauts de fonctionnement qui proviennent d'un mauvais entretien, d'un choc ou d'un démontage en dehors de nos services techniques.

**Sont exclus** : les piles ainsi que les dégâts causés par celles-ci. Toute réparation effectuée en dehors de nos services techniques pendant la durée de la garantie et toute utilisation non prévue dans ce guide entraînent immédiatement la fin de la garantie.

L'acheteur bénéficie de la garantie des vices cachés conformément à l'article 1641 du Code Civil. Les aides auditives voyagent aux risques et périls de l'expéditeur.





L'audition est notre mission™

**Fabricant :**

Starkey Laboratories, Inc. 6700  
Washington Avenue South  
Eden Prairie, MN 55344-3476  
USA

**Distributeur :**

Starkey France  
23 rue Claude Nicolas Ledoux  
Zone Europarc  
94000 CRETEIL  
France

**Représentant Européen :**

Starkey Laboratories, Ltd. William  
F. Austin House Bramhal Technology  
Park Hazel Grove Stockport, Cheshire,  
United Kingdom SK7 5BX



CE  
0086



Les mentions "Made for iPod," "Made for iPhone," et "Made for iPad" désignent un accessoire électronique qui a été conçu spécialement afin d'être connecté à des modèles iPhone, iPad et iPod et qui a été certifié par le développeur, conforme aux normes de performance d'Apple. Apple n'est pas responsable du fonctionnement de cet appareil ni de sa conformité aux normes de réglementation et de sécurité. Veuillez noter que l'utilisation de cet accessoire avec un iPad, iPhone ou iPod peut affecter la performance sans-fil.

© 2015 Starkey Hearing Technologies. Tous droits réservés

DAQ N° 99214-292

Révision B

le 03/04/15

Apple, le logo Apple, iPhone, iPad, iPod touch, Siri et FaceTime sont des marques d'Apple Inc., enregistrées aux Etats-Unis et dans d'autres pays. App Store est une marque d'Apple Inc.